

# BACTICID AF WIPES

## DESINFITSEERIVAD RÄTIKUD

BACTICID AF WIPES on alkoholi baasil valmislahusega immutatud rätikud alkoholi taluvate mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete ja pindade kiirdesinfektsiooniks. Toode sobib kasutamiseks kohtades, kus on nõutav regulaarne kiirdesinfektsioon. Rätikud on ebemevabad, mittekoatud ega sisalda tselluloosi. BACTICID AF WIPES ei vaja mahapesemist. Ei jäta pinnale ebemeid ega muuda pindade visuaalset väljanägemist. Võib kasutada ka toiduga kokkupuutuvate pindade desinfitseerimiseks.



BACTICID AF WIPES on laia bakteritsiidse (k.a MRSA, VRE), mükobakteritsiidse (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae), virutsiidse (sh kõik ümbrisega viirused nagu HBV, HIV, HCV ning ümbriseta Adeno-, Noro- Polio- ja Vacciniaviirus), fungitsiidse ja pärmseentevastane toimega.

### KASUTUSALA:

BACTICID AF WIPES on efektiivne vahend meditsiiniseadmete kiireks desinfektsiooniks kõrgendatud hügieeninõuete tingimustes, kus desinfitseerimine on tähtsaim profülaktiline abinõu infektsiooni vältimiseks, nagu näiteks:

- Haiglad ja teised tervishoiuasutused
- Operatsioonisaalid ja protseduuriruumid
- Intensiivpalatid
- Erakorralise meditsiini osakonnad
- Dialüüsiosakonnad
- Perearstid ja esmaabi
- Polikliinikud
- Laboratooriumid
- Hambaarsti kabinetid
- Patsientide koduhooldus
- Toiduainete tööstus ja suursöögid
- Ravimi- ja kosmeetikatööstus

---

**KASUTAMINE:**

Avada kaane otsas olev klapp ja tõmmata sealt välja rätik kuni perforeeritud kohani. Rätiku lahti rebimiseks võib pakendit teise käega toetada. Peale rätiku välja tõmbamist sulgeda klapp koheselt, et vältida rätikute kuivamist.

Desinfitseeritavad pinnad pühkida rätikuga nii, et kogu pind oleks ühtlaselt desinfektsioonivahendiga niisutatud.

Toimeaeg 30sekundit.

---

**MIKROBIOLOOGIA:**

Mikroorganism		Toimeaeg
Escherichia coli	lahjendamata	30 sek.
Enterococcus hirae	lahjendamata	30 sek
Staphylococcus aureus	lahjendamata	30 sek.
Pseudomonas aeruginosa	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium terrae	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium avium	lahjendamata	30 sek
Candida albicans	lahjendamata	30 sek
Kõik ümbrisega viirused (k.a HBV/HCV, HIV, Vaccinia)	lahjendamata	15 sek
Adeno virus	lahjendamata	30 sek
Noro virus	lahjendamata	15 sek
Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE)	lahjendamata	30 sek

---

**BACTICID AF WIPES desinfitseerimislahus on testitud järgmiste Euroopa Liidu standardite järgi:  
EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.**

---

#### **ETTEVAATUSABINÕUD:**

Vahend ja selle aurud on väga tuleohtlikud! Hoida eemale süttimisallikast - Mitte suitsetada!  
Hoida lastele kättesaamatus kohas!  
Hoida pakend suletuna! Kasutada kaitsekindaid!  
Säilitada hästi ventileeritavas ruumis! Hoida jahedas!  
Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.



---

#### **KOOSTIS:**

100g desinfitseerimislahust sisaldab: etanool 57g, isopropanool 6g

**Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas  
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile**



---

#### **PAKENDID:**



100tk purgis  
(16 x 20 cm)



150tk purgis  
(20 x 20 cm)



200tk purgis  
(20 x 20 cm)



400tk purgis  
(17 x 25 cm)



AS Chemi-Pharm  
Tänassilma tee 11, Saku vald, 76406Eesti  
www.chemi-pharm.com  
chemi-pharm@chemi-pharm.com